



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**ALGINATE KARIŞTIRMA CİHAZI KULLANIM VE
BAKIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.15
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Alginate karışma cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Alginate karıştırma cihazı bulunun bölümleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Alginate karıştırma cihazı bulunan bölümlerin çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihaz prize takılır.
- ON düğmesine basılır, cihaz açılır.
- Cihazın üst kapağı açılır, (+) ve (-) tuşları ile istenilen süre ayarlanır.
- İstenilen miktarda alginate, alginate kabına konur. Uygun miktarda su eklenerek kabın kapağı kapatılır.
- Alginate kabı cihazın içindeki yerine konur. Cihazın kapağı kapatılır. "START" düğmesine basılır.
- Cihaz karıştırma işlemini bitirdikten sonra cihazın kapağı açılarak alginate kabı cihazın içinden çıkarılır, kaptaki karışım ölçü kaşıklarına konur.
- OFF düğmesine basılır, cihaz kapatılır.
- İhtiyaç halinde ve gün sonunda temizlik personeli tarafından temizlenir.
- Arıza durumunda veya bakımı için sorumlu hemşireye bilgi verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.