



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
AMALGAMATÖR CİHAZI
KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman Kodu	DMC.TL.16
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Amalgamatör cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Amalgamatör cihazının bulunduğu bölümleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Amalgamatör cihazı bulunan bölümlerde cihazı kullanan çalışanlar

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihazın fişi prize takılır. On /off tuşuna basılarak açılır.
- Çalıştırılması istenen program seçilir.
- START butonuna basıldıktan sonra istenilen doz cihazın solundaki ayar kolu ileri geri ettirerek ayarlanır. Her bir ileri-geri hareket bir porsiyon amalgama eş değerdir.
- Cihaz geri sayımı sonlandırdıktan sonra karışımın içinde bulunduğu küçük kap çevrilerek yerinden çıkarılır.
- Kabın içindeki amalgam alındıktan sonra kap yerine çevrilerek takılır.
- Cihaz on/off tuşuna basılarak kapatılır.
- İhtiyaç halinde ve gün sonunda temizlik personeli tarafından temizlenir.
- Arıza durumunda veya bakımı için sorumlu hemşireye bilgi verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.