



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**NİHON KOHDEN TEC-5521K DEFİBRİLATÖR
KONTROL TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.17
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Defibrilatör cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM:

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Defibrilatör cihazının mevcut olduğu bölüm sorum hemşiresi

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihaz prize sürekli takılı olmalıdır.
- Cihaz bir numaralı düğmeden açılarak kırmızı göstergesi 50 joule ayarlanır.
- Kaşıklar iki ele alınır ve birbirinden ayrı/uzak tutularak, kaşıkların üzerindeki 'charge' tuşlarına aynı anda bir kez basılarak yada monitör üstündeki 'charge' tuşuna basılarak elektro şok verilir. Elektro şok verilme sırasında kimsenin cihaza ve kaşıklara dokunmadığından emin olunur.
- Elektro şok verildikten sonra monitördeki 50 joule uyarısının sıfırlanması beklenir.
- Elektrot kontrolü yapılır.
- Pulse oksimetre kablosu kontrol edilir.
- Jelin son kullanma tarihi kontrol edilir.
- Defibrilatör kâğıdı kontrol edilir.
- Kaşık temizlik kontrolü yapılır. Yetişkin boy kaşıklar kızığından çıkarılır, kontrol edilir ve tekrar yerine takılır.
- Cihaz bir numaralı düğmeden of moduna getirilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.