



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**EXTRA ORAL SAKŞIN CİHAZI KULLANIM VE
BAKIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.18
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Extra oral sakşın cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.
- KAPSAM:** Extra oral sakşın cihazının bulunduğu klinikler.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Extra oral sakşın cihazının bulunduğu kliniklerde cihazı kullanan çalışanlar
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihaz prize takılır.
 - Cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesi açılır.
 - Cihazın kumandası üzerindeki On/ Off düğmesi 'On' tarafına getirilerek cihaz açılır.
 - Cihazın aspirasyon yapan hortumlu sisteminin ucu çalışılacak alana göre konumlandırılır.
 - Cihazın kumandasındaki vakum ayar düğmesi çevrilerek vakum gücü istenilen dereceye çıkarılır.
 - İşlemden sonra vakum düğmesi çevrilerek vakum gücü sıfırlanır. Kumanda üstündeki On/Off düğmesi 'Off' konumuna getirilir.
 - Cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesi kapatılır.
 - İhtiyaç halinde ve gün sonunda temizlik personeli tarafından temizlenir.
 - Arıza durumunda veya bakımı için sorumlu hemşireye bilgi verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.