



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**ART ELECTROSURGE KOTER
CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.19
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. **AMAÇ:** Koter cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. **KAPSAM:** Koter cihazı bulunan bölümleri kapsar.

3. **KISALTMALAR:**

MSÜ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

4. **TANIMLAR:**

Dekontaminasyon: Kontamine tıbbi araç ve gereçlerle, yüzeylere çıplak elle dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak derecede, üzerindeki mikroorganizmalardan arındırma işlemidir.

5. **SORUMLULAR:** Koter cihazının bulunduğu bölümlerde cihazı kullanan çalışanlar.

6. **FAALİYET AKIŞI:**

- Kırmızı renkli koter plağı ve kablosu, cihazın ön yüzünde bulunan kontrol panelindeki kırmızı renkli girişe takılır.
- Koter kontrol klemi, koter plağı girişinin üstünde bulunan girişe takılır.
- Koter pedalı, cihazın arka yüzünde bulunan pedal kablosu girişine takılır.
- Koter güç kablosu cihazın arka yüzünde bulunan güç girişine takılır.
- Cihazın ön yüzündeki 'power' düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Kırmızı koter plak hastaya verilir, hastanın cildine temas edecek şekilde elinde tutması sağlanır.
- Koter kalem uçlarından tercih edilen uç, koter kalemine takılır.
- Uygun olan operasyon modu, operasyon modu (cut-coag1-coag2) kontrol düğmesi çevrilerek ayarlanır.
- Led ışıklı çıkış şiddeti kontrol düğmesi çevrilerek işlem gücü ayarlanır.
- Operasyondan sonra led ışıklı çıkış şiddeti kontrol düğmesi çevrilerek işlem gücü sıfırlanır.
- Cihaz ön yüzündeki 'power' düğmesine basılarak kapatılır.
- Kullanılan koter kalem ucu, koter kaleminden çıkarılır. Dekontamine edilerek sterilizasyon için MSÜ'ye gönderilir.
- Cihaz her kullanımdan sonra ve gerektiğinde temizlik personeli tarafından temizlenir.
- Arıza durumunda veya bakımı için sorumlu hemşireye haber verilir.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

8. **REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.