



**1. AMAÇ:** Ek bina merkezi dental aspiratör cihazlarının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:**

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**

**5. SORUMLULAR:** Teknik atölye çalışanları

**6. FAALİYET AKIŞI:**

- Cihaz sadece eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Cihaz dental ünitlerin veya benzeri uygulamalarda gerekli dental aspirasyonu sağlamak için tasarlanmıştır. Cihazı amacı dışında kullanmayınız.
- Cihazı +10 ile +40 arası °C arası ve nemiz kuru bir ortamda çalıştırın.
- Cihaz çalıştırılmadan önce her zaman cihazın kullanılabilirliği kontrol edilir.
- Cihaz üzerinde çalışırken ilgili elektrik yönetmeliklerine uyulur.
- Hasarlı elektrik bağlantı kablolarını ve prizleri derhal değiştirin.
- Cihaz düzenli olarak kontrol edilerek gösterge ekranında herhangi bir hata varsa hata giderme talimatlarına göre hata giderilmelidir.
- Cihazda oluşan hataların giderilmemesi durumunda yetkili firma veya servise haber verilmelidir.
- Cihazın üretici firma veya yetkili firma tarafından belirlenen periyotlar dahilinde düzenli olarak periyodik bakımını yaptırın.
- Cihazın yapısını değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Sadece orijinal aşınır parça ve yedek parçalar kullanın.
- Cihazın kullanım klavuzunu, her zaman kullanıcının erişeceği şekilde cihazın yanında bulundurun.

#### Merkezi Aspiratör Cihazı Bakım Planı

Merkezi Aspiratör Cihazı Bakım Planı		Bakım Aralığı
	Pano üzerindeki uyarı ikaz lambalarını kontrol ediniz.	12 saat / 3 yıl
	Orotol plus dejenfektan sıvı seviyesini kontrol ediniz.	12 saat / 3 yıl
	Baypas valfini temizleyiniz.	12 saat / 3 yıl
	Egzoz çıkış çek-valfini kontrol ediniz, gerekli durumda değiştiriniz.	1 saat / 1 yıl
	Blower emiş ve hava çıkış filtrelerini kontrol ediniz, kirlenmiş veya yıpranmış ise değiştiriniz.	1 saat / 1 yıl
	Seviye samandıra swichlerini kontrol ediniz.	1 saat / 1 yıl
	Ünitler üzerindeki vakum gücünü ölçünüz.	1 saat / 1 yıl
	Bakteri filtresini değiştiriniz.	12 saat / 3 yıl



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**ASPIRATÖR GÜVENLİK VE BAKIM TALİMATI  
(MARKA/MODEL : DÜRR DENTAL V-18000)**

Doküman Kodu	DMC.TL.20
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	2 / 2

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

Aspiratör Bakım ve Kontrol Formu

**8. REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.