



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
KOMPRESÖR CİHAZI
KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
(MARKA/MODEL: DÜRR DENTAL P-12000)

Doküman Kodu	DMC.TL.21
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 2

1. AMAÇ: Ek bina merkezi dental kompresör cihazlarının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM:

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Teknik atölye çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihaz sadece eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Cihaz dental ünitelerin veya benzeri uygulamalarda gerekli olan basınçlı hava üretimi için tasarlanmıştır. Cihazı amacı dışında kullanmayınız.
- Cihazı +10 ile +40 arası °C arası ve nemiz kuru bir ortamda çalıştırın.
- Cihaz çalıştırılmadan önce her zaman cihazın kullanılabilirliği kontrol edilir.
- Cihaz üzerinde çalışırken ilgili elektrik yönetmeliklerine uyulur.
- Hasarlı elektrik bağlantı kablolarını ve prizleri derhal değiştirin.
- Cihaz düzenli olarak kontrol edilerek gösterge ekranında herhangi bir hata varsa hata giderme talimatlarına göre hata giderilmelidir.
- Cihazda oluşan hataların giderilmemesi durumunda yetkili firma veya servise haber verilmelidir.
- Cihazın üretici firma veya yetkili firma tarafından belirlenen periyotlar dahilinde düzenli olarak periyodik bakımını yaptırın.
- Cihazın yapısını değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Sadece orijinal aşınır parça ve yedek parçalar kullanın.
- Cihazın kullanım klavuzunu, her zaman kullanıcının erişeceği şekilde cihazın yanında bulundurun.

Merkezi kompresör bakım planı

Merkezi Kompresör Cihazı		Bakım Aralığı
Bakım Planı		
	Siklon separatoründen çıkan kondensat ayırcısını kontrol edin.	3.2 hafta / 3 yıl
	Su toplama kondensat separatorünün işler durumda olduğunu ve bağlantılarını kontrol edin.	3.2 hafta / 3 yıl
	Kesici tahliye valflerini kontrol edin, gerekirse değiştirin.	3.2 hafta / 3 yıl
	kurutucudaki hava ızgaralarını kontrol edin. ızgaralar kirli veya üstü kapalı olmamalıdır.	3.2 hafta / 3 yıl
	Tankta kondensat kontrolü yapın, gerekirse soğuk kurutucunun ve siklon separatorünün işler durumda olduğunu kontrol edin.	3 hafta / 3 yıl
	Basınçlı hava birleştirme yerlerinin sızdırmadığını kontrol edin, gerekirse sızdırmazlığı sağlayın.	3 hafta / 3 yıl
	Basınçlı hava istasyonunu gözle ve dinleyerek kontrol edin, gerekirse civataları sıkın.	3 hafta / 3 yıl
	Kompresör ünitelerinin çalışma saatlerini kontrol edin. Her bir kompresör ünitesi arasında büyük fark bulunması durumunda müşteri servisine başvurun.	3 hafta / 3 yıl
	Aspirasyon bakteri filtresinin filtre elemanı değiştirin.	3 hafta / 3 yıl

Uyarı !! : Cihaz; arıza, bakım ve normal işletmeye alındığı durumlarda koruyucu kutaklık kullanınız.



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
KOMPRESÖR CİHAZI
KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
(MARKA/MODEL: DÜRR DENTAL P-12000)

Doküman Kodu	DMC.TL.21
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	2 / 2

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Kompresör Bakım ve Kontrol Formu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.