



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**OTOMATİK YAĞMALA MAKİNASI CİHAZI
KULLANIM VE BAKIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.22
Yayın Tarihi	19.06.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Yağlama cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.
- KAPSAM:** Yağlama cihazı bulunan bölümleri kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Yağlama cihazının bulunduğu bölümlerde cihazı kullanan çalışanlar.
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Hava açılır.
 - Cihazın kapağı açılır.
 - Yağlanacak olan aeratör, angulduruva, miktomotor cihaza takılır. Eğer yağlama cihazı ile aeratör, angulduruva, miktomotor girişlerinde uyumsuzluk varsa coupling kullanılarak uyum sağlanır.
 - Cihazın tuşuna 2 saniye süreyle basılarak cihazın çalışması sağlanır.
 - Yağlanan aeratör, angulduruva, mikromotor cihazdan çıkarılır.
 - Hava kapatılır.
 - İhtiyaç halinde ve gün sonunda temizlik personeli tarafından temizlenir.
 - Arıza durumunda veya bakımı için sorumlu hemşireye bilgi verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.