



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
DOĞAL GAZLI BEK KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	DTY.TL.02
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı gazlı bek kullanım ve bakımını tanımlamaktır.

2. KAPSAM: Fakültemizde bulunan doğal gazlı bek bulunan birimleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Laboratuvar çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Ana vanayı açınız.
- Kullanım ihtiyacına göre uygun gaz musluğunu kapalı konumdan açık konuma getiriniz.
- Brülöre gaz gelmeye başlayınca vakit geçirmeden ateşleyici ile beki ateşleyerek ocağı kullanmaya hazır hale getiriniz.
- Bek hortumuna sıcak spatul ve kesici delici aletleri yaklaştırmayınız.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için gaz musluğunu tekrar kapalı konuma getiriniz.
- Ana vanayı kapatınız.
- Cihazı her çalıştırma gününün sonunda ateşin söndüğünden emin olunuz.
- Cihaz yüzeyini temizlerken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanmayınız. Bu yüzeyleri sıcak su ile temizleyiniz.
- Düzenli aralıklarla gaz kaçağı kontrolü yapınız.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.