



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ  
**OKSİJEN TÜPÜ KONTROL TALİMATI**

Doküman Kodu	DTY.TL.03
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Fakültemizde kullanılan oksijen tüplerinin kontrollerine ilişkin işlemleri tanımlamaktır.
- KAPSAM:** Fakültemizde bulunan tüm oksijen tüplerini kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Klinik sorumlu Hemşireleri, Kalite Yönetim Birimi, Birim Kalite Sorumluları

#### 6. FAALİYET AKIŞI:

Oksijen tüpünün kapakları takılı olmalıdır. Oksijen tüpleri ateşten ve sıcaktan uzak tutulmalıdır. Oksijen tüpleri dik konumda muhafaza edilmelidir. Tüplere yağlı eller ile temas edilmemelidir. Kontrolleri haftalık yapılmalıdır. Aşağıda yer aldığı şekilde değerlendirilmelidir. Sorun olmadığında "UYGUN" yazılmalıdır. Sorun varsa "UYGUN DEĞİL" yazılarak Kalite Yönetim Birimi'ne bildirilir.

Oksijen tüpü fiziksel olarak kontrol edilir.

**Manometre Kontrolü:** Oksijen tüpünün manometresi kontrol edilir. Vana hafifçe açılır, manometrenin ibresinin yükselmesi gerekir.

**Vana kontrolü:** Vana açık olduğunda topun yükselmesi gözlenir. Hava akışı kontrol edilir. Vana kapatılır.

**Su haznesi kontrolü:** Su alt ve üst sınır arasında olmalıdır.

**Doluluk (Bar) Kontrolü:** Vana hafifçe açılır manometrenin ibresinin yükselmesi gerekir, ibrenin durduğu sayı bar göstergesidir.

#### 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Oksijen Tüpü Kontrol Formu

#### 8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " <b>Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi</b> " olarak değiştirilmesidir.