



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**SPREY FORM YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN
KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	SEN.TL.07
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	1 / 2

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı yedeği olmayan tıbbi cihazların tekrar kullanılması gerektiğinde temizlik ve yüksek düzey dezenfeksiyonunu standart hale getirmek hastanın ve malzemenin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapan hekim ya da personelin; enfeksiyondan ve kimyasal maddelerin verdiği zarardan korunmasını sağlamaktır.
- 2. KAPSAM:** Bu talimat yedeği olmayan tıbbi cihazların kullanımı sonrası temizlik, dezenfeksiyon ve yeniden kullanılıncaya kadar geçen zamana kadar olan süreçleri kapsar.
- 3. KISALTMALAR:**
- 4. TANIMLAR:**
- 5. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulamasından malzemeyi kullanan hekim ve temizlik ve dezenfeksiyonu yapan sağlık personeli sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI:

Temizlik

- Temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumlu personel bu işleme başlamadan önce koruyucu gömlek, eldiven, maske ve göz koruyucu takar (siperlikli maske).
- Temizlik işlemleri malzemenin kullanımından hemen sonra kurumadan başlatılmalıdır.
- Kullanılan malzeme bol su ile yıkanarak tüm kir, tükürük, kan ve organik maddelerden arındırılmalıdır. Gerek görüldüğü takdirde fırça kullanarak temizlenmelidir.
- Eğer fırça ile temizlik yapıldıysa, kullanılan fırça temiz bırakılmalıdır (tel fırça kullanılmamalıdır).

Dezenfeksiyon

- Ürünü yüzeye 30 cm mesafeden püskürtülür.
- Yüzeyi tamamen ıslatacak şekilde silinir.
- Kurumaya bırakılır.



- Ürün temiz bir beze püskürtülür.
- Yüzeyi tamamen ıslatacak şekilde silinir.
- Kurumaya bırakılır.





EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**SPREY FORM YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN
KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	SEN.TL.07
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	2 / 2

DURULAMA

- Dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra kimyasal atıkları uzaklaştırmak için bol su ile yıkanarak durulanmalıdır.
- Durulama işlemi musluk suyu ile yapıldıktan sonrasında kullanılan malzemenin yüzeyleri orta yüzey %70 alkol içeren dezenfektan mendil ile silinip kuru ve kapaklı kaplarda muhafaza edilmelidir.

KURUTMA VE MUHAFAZA

- Islak ortam mikroorganizmalarla kontaminasyonu ve yayılmayı kolaylaştırır. Bu durumu önlemek için yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlanmış malzemenin iyice kurutulması gerekir.
- Dezenfeksiyon işlemi görmüş malzemeler yeniden kontamine olmalarını engelleyecek ve zarar görmeyecek şekilde dolap ve kapaklı kutularda dik bir şekilde saklanmalıdır.
- Ürün açıldıktan sonra son kullanma tarihi göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.
- Yüksek düzey dezenfeksiyonu için kullanılacak dezenfektan ve yöntemler için enfeksiyon kontrol komitesinin görüşü alınmalıdır.
- Yüksek düzey dezenfeksiyonu yapılmış malzemenin kullanıldığı işlem sonrası enfeksiyon saptanırsa bu durumdan enfeksiyon kontrol komitesi haberdar edilir.
- Enfeksiyon kontrol komitesi yüksek düzey dezenfeksiyonun kullanıldığı alanlarda haberli veya habersiz denetimler ile hasta güvenliği ve çalışan sağlığını korumak üzere talimata uyumu denetlemekle yükümlüdür.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, -"Kontrol Eden" kısmında yer alan "Kalite Yönetim Direktörü" nün "Kalite Yönetim Sorumlusu" olarak değiştirilmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.