



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**BASINÇLI AKRİL TENCERESİ KULLANMA
TALİMATI**

Doküman Kodu	SPL.TL.05
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Basınçlı akril tenceresinin etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Basınçlı akril tenceresi bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- İş tencereye ılık su içinde yerleştirilir.
- Kapak dişliler oturacak şekilde kapatılır.
- Kırmızı hava çıkış vanası kapalı konuma getirilir.
- Hava pompası ile 2 atmosfer hava basılır.
- Polimerizasyon süresi dolunca kırmızı vana açıp basıncı boşaltılır.
- Tüm basınç boşaldıktan sonra kapak açıp iş alınır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.