



1. AMAÇ: Biodent fırınının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Biodent fırını bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Fiş takılır.
- Hava açılır.
- Basınç, ısı ve zaman ayarını yapıp malzeme hazneye yerleştirilir.
- Önce kapak sonra dik çubukla kilitli konuma getirilir.
- Zaman dolunca suyu boşaltması beklenir.
- Su boşalınca kilitler açılır ve kapak kaldırılır.
- Hava kapatılır ve fiş çıkarılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, -"Kontrol Eden" kısmında yer alan "Kalite Yönetim Direktörü" nün "Kalite Yönetim Sorumlusu" olarak değiştirilmesi, - Cihaz sicil numarasının eklenmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.