



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

POLİSAJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI
Cihaz Sicil No: 253.3.5/13/271761

Doküman Kodu	SPL.TL.10
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Polisaj cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Polisaj cihazı bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Fişi takılır
- Kullanılacak aparatı takılır. (Keçe ya da kıl fırça)
- Sağdaki düğmeyi saat yönünde çevrilir.
- Soldaki vakum düğmesini 1500 ya da 3000 tercihe göre çevrilir.
- Parlatacağınız apareyi önce keçe, kıl fırça sonra da pamuk fırça ile parlatılır.
- Fazla bastırmaktan kaçınılır. (Protezin fırlamasından, elinizi kaptırmaktan kaçının)
- İş bitiminde makine kapatılır.
- Kullanılan aparatların kaba kiri su altında yıkandıktan sonra kapalı plastik kaplar içinde bulunan orta düzey dezenfektanda 10 dakika bekletilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, -"Kontrol Eden" kısmında yer alan "Kalite Yönetim Direktörü" nün "Kalite Yönetim Sorumlusu" olarak değiştirilmesi, - Cihaz sicil numarasının eklenmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.