



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
VAKUMLU KARIŞTIRICI KULLANMA TALİMATI
Cihaz Sicil No: 253.3.6/13/271768

Doküman Kodu	SPL.TL.11
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Polisaj cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Polisaj cihazı bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Fişi takılır.
- Haznenin içine karıştırılacak malzeme koyulur.
- Haznenin yerleşeceği mandal aşağıya doğru itilir.
- Hazne oluklara oturtulur.
- Boşaltma borusu hazneye takılır.
- Zaman ayarı yapıp başlatılır.
- Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir.
- Mandalı aşağı iterek hazne çıkartılır.
- Fiş çekilir ve hazne temizlenir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, -"Kontrol Eden" kısmında yer alan "Kalite Yönetim Direktörü" nün "Kalite Yönetim Sorumlusu" olarak değiştirilmesi, - Cihaz sicil numarasının eklenmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.