



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ  
**PUNTA MAKİNASI KULLANMA TALİMATI**

Doküman Kodu	SPL.TL.13
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

**1. AMAÇ:** Punta makinasının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Punta makinası bulunan laboratuvarları kapsar.

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**

**5. SORUMLULAR:** Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

**6. FAALİYET AKIŞI:**

- Cihaz fişe takılır,
- Kaynak yapılacak parçalar kaynak uçlarına sıkıştırılır.
- Açma kapama düğmesi açık konuma getirilir, kaynak güç düğmesi istenilen konuma getirilir.
- (I-II) daha sonra kaynak düğmesine basılıp, bırakılır, kaynak işlemi uygun olan değişik noktalardan tekrarlanır, açma kapama düğmesi kapalı konuma getirilir, gün sonunda cihaz fişten çıkarılır.

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

**8. REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.