



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ  
**PORSELEN FIRINI KULLANMA TALİMATI**

Doküman Kodu	SPL.TL.15
Yayın Tarihi	17.10.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1/1

**1. AMAÇ:** Porselen fırınının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Porselen fırını bulunan laboratuvarları kapsar.

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**

**5. SORUMLULAR:** Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

**6. FAALİYET AKIŞI:**

- Fişi takılır.
- Fırın haznesine yapılacak olan iş yerleştirilir.
- Fırının üzerinde önceden belirlenen program seçilir.
- Başlatma tuşuna basılır.
- Aletin kapağı otomatik olarak kapanarak seçili işlem başlar.
- Program bittikten sonra kapak otomatik olarak açılır.
- Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir.
- İş fırın haznesinde oda ısısına gelinceye alınır.
- Fiş çekilir ve hazne temizlenir.

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

**8. REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.