



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
KURŞUN ÖNLÜK KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	SRG.TL.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Kurşun önlüklerin kullanımı ve saklanması açıklanmaktadır.
- KAPSAM:** Fakültemizde kullanılan kurşun önlükleri kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:**
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Koruyucu kurşun önlüklerin delik ve yırtık olmamasına dikkat ediniz.
 - Kurşun önlükleri asla katlamayınız ve eteklerinden asmayınız.
 - Koruyucu önlükleri sandalye ve koltuk üzerine buruşuk bir şekilde koymayınız, çivi şeklindeki tek duvar askılığına asmayınız.
 - Mümkünse 10-C – 20-C arası bir yerde ve özel askılıklarda muhafaza ediniz, kesinlikle kalorifer yanına koymayınız.
 - Hafif kirlenmelerde yumuşak bir bezle, ılık su ve bulaşık deterjanı kullanarak siliniz, alkol içerikli bir temizleme maddesi kullanmayınız.
 - Kullanmadan önce görünürde bir fiziki hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Yırtıklar, görünür katlanmalar ve düzgün olmayan yüzey hata belirtileridir. Bu tür durumlar olduğunda x-ışınına maruz bırakarak korumanın uygunluğuna bakınız. Eğer iyi koruma yoksa ürünü kullanmayınız.

KULLANMADIĞINIZ KURŞUN ÖNLÜKLERİ LÜTFEN ÖZEL ASKILIĞINA ASINIZ.

7. İLGİLİ DOKÜMAN:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.