



EGE ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

**PANOROMİK RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA  
TALİMATI**

Doküman Kodu	SRG.TL.02
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

- 1. AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak.
- 2. KAPSAM:** Fakültemizde bulunan panoromik röntgen cihazlarını kapsar.
- 3. KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- 4. TANIMLAR:**
- 5. SORUMLULAR:**
- 6. FAALİYET AKIŞI:**
  - On-Off düğmesine basılarak cihaz açılır.
  - Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
  - Dijital panoromik röntgen cihazında cihaza bağlı bilgisayarda hastanın bilgileri kaydedilir.
  - Hastaya Tiroid koruyucu takılır. (Bkz. "**Kurşun Önlük Kullanma Talimatı**")
  - Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak hastanın cihazdaki konumu belirlenir.
  - Kurşun bariyer arkasına geçilir şutlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
  - Her hastadan sonra cihaz orta düzey dezenfektan ile silinir.
  - Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.
  - Cihaz hata kodu verir ise teknik servis bilgilendirilir. "**Malzeme ve Cihazların Etkin Yönetimine İlişkin Prosedür**" doğrultusunda işlem yapılır.
  -
- 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**
  - Kurşun Önlük Kullanma Talimatı
  - Malzeme ve Cihazların Etkin Yönetimine İlişkin Prosedür