



EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

**PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA
TALİMATI**

Doküman Kodu	SRG.TL.03
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Donanımın amacına uygun etkili ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Fakültemizde bulunan panoromik röntgen cihazlarını kapsar.

3. KISALTMALAR: Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

6. FAALİYET AKIŞI:

- On-Off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- Hastaya tiroid koruyucu takılır. (Bkz. "**Kurşun önlük kullanma talimatı**")
- Cihaz üzerinde her hastaya ve dişe uygun ayarlamalar (diş numarası, hasta tipi, doz ayarı) yapılır.
- Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak film hasta ağızına yerleştirilir.
- Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak periapikal röntgen cihazının başı hastaya göre açılı verilerek konumlandırılır.
- Kurşun bariyer arkasına geçilir şutlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
- Her hastadan sonra cihaz orta düzey dezenfektan ile silinir.
- Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.
- Cihaz hata kodu verir ise teknik servis bilgilendirilir. "**Malzeme ve Cihazların Etkin Yönetimine İlişkin Prosedür**" doğrultusunda işlem yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Kurşun Önlük Kullanma Talimatı

Malzeme ve Cihazların Etkin Yönetimine İlişkin Prosedür