



EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	SRG.TL.04
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Fakültemizde bulunan ultrason cihazını kapsar.

3. KISALTMALAR: Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

6. FAALİYET AKIŞI:

- On-Off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- Ultrasonografi cihazının menüsünde New Patient uygulamasına girilerek hastanın bilgileri kaydedilir.
- Hasta görüntüleme yapılacak bölgeye bağlı olarak muayene yatağına yatırılır ya da uygun konumda oturması sağlanır.
- Ultrasonografik görüntüleme kullanılan problar üzerine jel yerleştirilerek ilgili bölgenin değerlendirilmesi yapılır.
- Görüntünün istenen özellikte olması için zoom ya da kontrast ayar düğmesi kullanılarak değerlendirilme yapılır.
- Hekim elde edilen görüntüyü kaydetmek için freze ve kaydet düğmelerini kullanır.
- Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: