



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

| | |
|-------------------|------------|
| Doküman Kodu | SRG.TL.04 |
| Yayın Tarihi | 27.05.2022 |
| Revizyon Tarihi | 08.08.2024 |
| Revizyon Numarası | 02 |
| Sayfa No | 1 / 1 |

1. AMAÇ: Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Fakültemizde bulunan ultrason cihazını kapsar.

3. KISALTMALAR: Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

6. FAALİYET AKIŞI:

- On-Off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- Ultrasonografi cihazının menüsünde New Patient uygulamasına girilerek hastanın bilgileri kaydedilir.
- Hasta görüntüleme yapılacak bölgeye bağlı olarak muayene yatağına yatırılır ya da uygun konumda oturması sağlanır.
- Ultrasonografik görüntülemeye kullanılan problar üzerine jel yerleştirilerek ilgili bölgenin değerlendirilmesi yapılır.
- Görüntünün istenen özellikte olması için zoom ya da kontrast ayar düğmesi kullanılarak değerlendirilme yapılır.
- Hekim elde edilen görüntüyü kaydetmek için freze ve kaydet düğmelerini kullanır.
- Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması |
|-------------|-----------------|--|
| 02 | 08.08.2024 | Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir. |