



EGE ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

**KAĞIT / PLASTİK POŞETLERLE PAKETLEME  
TALİMATI**

Doküman Kodu	SSH.TL.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

- 1. AMAÇ:** Kağıt / plastik poşetlerle paketlemenin doğru yapılmasını sağlamaktır.
- 2. KAPSAM:** Kağıt / plastik poşetlerle paketlemenin tüm basamaklarını kapsar.
- 3. KISALTMALAR:**
- 4. TANIMLAR:**
- 5. SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları
- 6. FAALİYET AKIŞI:**
  - Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.
  - Kağıt / plastik poşet malzemeye uygun boyutta kesilir.
  - Paket açma yönünün aksi tarafı makine yardımı ile yapıştırılarak malzeme konulmaya hazır hale gelir.
  - Malzeme içine konulduktan sonra açık olan kısım makine yardımı ile yapıştırılır.
  - Küçük müdahale birimlerinde kullanılacak tüm paketler çift paket yapılır.
  - Diğer birimlerde kullanılacak alet ve malzemeler ağırsa veya birden fazla ise çift kat paketleme yapılır.
  - Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.
  - Her pakete kimyasal indikatör konur.
  - Paket yapıldıktan sonra paket kapatılır.
  - Paketin arka kısmına steril edildiği tarih ve paketleyen kişinin bilgileri yazılır.
- 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**