



1. AMAÇ: Ultrasonik yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Ultrasonik yıkama cihazının tüm basamaklarını kapsar.

3. KISALTMALAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi: MSÜ

4. TANIMLAR:

Ultrasonik yıkama cihazı: Dental aletlerin üzerindeki organik maddelerin belli bir sıcaklıkta 44-55°C de ultrasonik dalgalar ile mekanik temizliğin yapılmasını sağlayan cihazdır.

5. SORUMLULAR: MSÜ çalışanları ve ultrasonik yıkama cihazı bulunan kliniklerdeki sorumlu hemşireler.

6. FAALİYET AKIŞI:

- Elektrik panosunun içinde yer alan güç kaynağı açılır.
- Ultrasonik Yıkama Cihazının içindeki sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur.
- Sıvı içine enzimatik solüsyon firma önerilerine göre eklenir.
- Cihazın güç düğmesi açılır.
- Digital göstergeden "ısı set temp" tuşu aracılığı ile istenilen ısı ayarlanır. İdeal 45-55 °C dir.
- Delikli yıkama sepetine malzemeler üst üste çok fazla alet olmayacak şekilde bütün malzemeler yerleştirilir.
- Aletler cihaz yüzeyine kesinlikle değmemelidir.
- Eklemlerli aletlerin (makas,portegü,pens vb) gibi aletlerin eklemleri açılarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
- İşlem yapılacak malzemelerin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
- Kapağı kapatılarak başlat düğmesine basılır.
- Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.
- Ultrasonik yıkama cihazının tankına konulan su kirlendikçe değiştirilir.
- Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bezle silinir.
- Cihaz çalışırken içine asla el sokulmamalıdır.
- Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: