



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANMA  
TALİMATI**

Doküman Kodu	SSH.TL.04
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

**1. AMAÇ:** Ultrasonik yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanılmasını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Ultrasonik yıkama cihazının tüm basamaklarını kapsar.

**3. KISALTMALAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi: MSÜ

**4. TANIMLAR:**

**Ultrasonik yıkama cihazı:** Dental aletlerin üzerindeki organik maddelerin belli bir sıcaklıkta 44-55°C de ultrasonik dalgalar ile mekanik temizliğin yapılmasını sağlayan cihazdır.

**5. SORUMLULAR:** MSÜ çalışanları ve ultrasonik yıkama cihazı bulunan kliniklerdeki sorumlu hemşireler.

**6. FAALİYET AKIŞI:**

- Elektrik panosunun içinde yer alan güç kaynağı açılır.
- Ultrasonik Yıkama Cihazının içindeki sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur.
- Sıvı içine enzimatik solüsyon firma önerilerine göre eklenir.
- Cihazın güç düğmesi açılır.
- Digital göstergeden "ısı set temp" tuşu aracılığı ile istenilen ısı ayarlanır. İdeal 45-55 °C dir.
- Delikli yıkama sepetine malzemeler üst üste çok fazla alet olmayacak şekilde bütün malzemeler yerleştirilir.
- Aletler cihaz yüzeyine kesinlikle değmemelidir.
- Eklemlı aletlerin (makas,portegü,pens vb) gibi aletlerin eklemleri açılarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
- İşlem yapılacak malzemelerin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
- Kapağı kapatılarak başlat düğmesine basılır.
- Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.
- Ultrasonik yıkama cihazının tankına konulan su kirlendikçe değiştirilir.
- Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bezle silinir.
- Cihaz çalışırken içine asla el sokulmamalıdır.
- Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

**8. REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " <b>Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi</b> " olarak değiştirilmesidir.