



Doküman Kodu	SSH.TL.09
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Reverse osmoz cihazı kullanım basamaklarını kapsar.
- KAPSAM:** Merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunan reverse osmoz cihazı cihazını kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Merkezi sterilizasyon çalışanları.
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Yumuşatma ünitesinden aldığı suyu ön partiküler filtre grubundan geçirip yüksek basınç altında revers osmoz membranına iletir.
 - Memrandan çıkan su 0.10 micro simens iletkenlikte prosese verilir.
 - Revers osmoz cihazının üzerinde bulunan menometrede su basıncı 7-12 bar arası olmalıdır.
 - Basınç düşmesi ve artması durumunda teknik servise haber verilmelidir.
 - Cihazda anormal bir durumla karşılaşırsa (taşma, koku, olağandışı ses) cihazın enerjisini kesip teknik servise bildirilmesi gerekmektedir.
- İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**