



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

REVERSE OSMOZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	SSH.TL.09
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. **AMAÇ:** Reverse osmoz cihazı kullanım basamaklarını kapsar.

2. **KAPSAM:** Merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunan reverse osmoz cihazı cihazını kapsar.

3. **KISALTMALAR:**

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:** Merkezi sterilizasyon çalışanları.

6. **FAALİYET AKIŞI:**

- Yumuşatma ünitesinden aldığı suyu ön partiküler filtre grubundan geçirip yüksek basınç altında revers osmoz membranına iletir.
- Memrandan çıkan su 0.10 micro simens iletkenlikte prosese verilir.
- Revers osmoz cihazının üzerinde bulunan menometrede su basıncı 7-12 bar arası olmalıdır.
- Basınç düşmesi ve artması durumunda teknik servise haber verilmelidir.
- Cihazda anormal bir durumla karşılaşırsa (taşma, koku, olağandışı ses) cihazın enerjisini kesip teknik servise bildirilmesi gerekmektedir.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

8. **REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.