



| | |
|-------------------|------------|
| Doküman Kodu | SSH.TL.10 |
| Yayın Tarihi | 27.05.2022 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon Numarası | 00 |
| Sayfa No | 1 / 1 |

- 1. AMAÇ:** Bu talimat etüv cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- 2. KAPSAM:** Fakültemizde etüv cihazının bulunduğu ve kullanıldığı klinikleri kapsar.
- 3. KISALTMALAR:**
- 4. TANIMLAR:**
- 5. SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları
- 6. FAALİYET AKIŞI:**
 - Steril olacak malzemeler etüvün içine yerleştirilir. (Tromel havalandırma deliklerinin açık olduğuna dikkat ediniz, alet ve tepsilerin üzerinin açık olmasına dikkat ediniz.)
 - Etüvün kapağını kapatınız. Üstteki soğutma deliğinin kapalı olduğuna dikkat ediniz.
 - Etüvün açma düğmesini açınız.
 - Isı 175°C ye geldikten sonra 60 dakika süre tutulup bu süre sonunda etüv kapatılır.
 - **İdeal Sterilizasyon Değerleri:** 175°C de 60 dk, 170°C de 90 dk, 140°C de 180 dk
 - Etüv soğumaya bırakılır, hemen kapağı açılmaz, bir süre beklenir.
 - Tromellerin kapakları kapatılarak dışarı çıkarılır.
 - Etüvün içi boşaltıldıktan sonra steril olan malzemeler kirli malzemelerle aynı yerde bulunmamalıdır.
 - Etüvün kullanımında sıcaklık ayarı doğru seçilmelidir. Plastik malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanamadığı için etüve konulmamalıdır.
 - Etüvün alt ızgarası boş bırakılıp, malzemeler uygun şekilde konulmalı, aşırı derecede doldurulmamalıdır.
- 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**