



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

ETÜV KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	SSH.TL.10
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Bu talimat etüv cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM: Fakültemizde etüv cihazının bulunduğu ve kullanıldığı klinikleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Steril olacak malzemeler etüvün içine yerleştirilir. (Tromel havalandırma deliklerinin açık olduğuna dikkat ediniz, alet ve tepsilerin üzerinin açık olmasına dikkat ediniz.)
- Etüvün kapağını kapatınız. Üstteki soğutma deliğinin kapalı olduğuna dikkat ediniz.
- Etüvün açma düğmesini açınız.
- Isı 175°C ye geldikten sonra 60 dakika süre tutulup bu süre sonunda etüv kapatılır.
- **İdeal Sterilizasyon Değerleri:** 175°C de 60 dk, 170°C de 90 dk, 140°C de 180 dk
- Etüv soğumaya bırakılır, hemen kapağı açılmaz, bir süre beklenir.
- Tromellerin kapakları kapatılarak dışarı çıkarılır.
- Etüvün içi boşaltıldıktan sonra steril olan malzemeler kirli malzemelerle aynı yerde bulunmamalıdır.
- Etüvün kullanımında sıcaklık ayarı doğru seçilmelidir. Plastik malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanmadığı için etüve konulmamalıdır.
- Etüvün alt ızgarası boş bırakılıp, malzemeler uygun şekilde konulmalı, aşırı derecede doldurulmamalıdır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.