



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ PAKETLEME
MAKİNASI KULLANIM VE TEMİZLİK TALİMATI**

Doküman Kodu	SSH.TL.12
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 3

- AMAÇ:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) deki paketleme makinası kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.
- KAPSAM:** MSÜ'deki paketleme makinasının kullanılması, temizliği ve kontrolleri için gereken tüm basamakları kapsar.
- KISALTMALAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde: MSÜ
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Kullanım için paketleme makinasının hazırlanması ve çalıştırılması;
 - "On" düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
 - Cihaz ısı 180 dereceye yaranır.
 - Cihaz arızalarında "**Tıbbi Cihazlar Arıza Giderme Talimatı**" doğrultusunda ilgili birime haber verilir.
 - Paketleme makinasının temizliğinde kullanılan malzemeler: ılık su, deterjan, yumuşak bez
 - Temizlik uygulaması:
 - Her gün bir kez yapılır.
 - Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir.
 - Diğer bir bezle deterjan giderilene kadar durulanır.
 - Kontrol panelinin tuşlarının olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
 - Temizlik işlemi sonrasında "**Msü'de Bulunan Tıbbi Cihazların Temizliği Talimatı**" doğrultusunda temizliği yapılır. "**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formu**" doldurulur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Tıbbi Cihazlar Arıza Giderme Talimatı
MSÜ'de Bulunan Tıbbi Cihazların Temizliği Talimatı
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.